

Bedienungsanleitung

Face Shield / Gesichtsschutz-Visier

FACE-SHIELD
ONE 

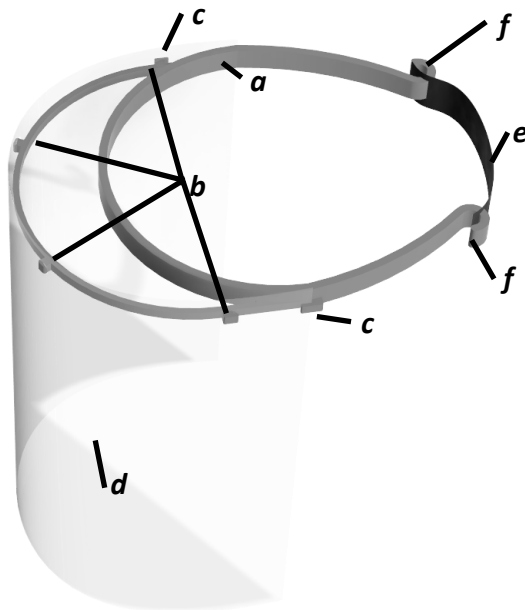


Abbildung Face Shield

Version 1.1

- a** Rahmen mit Stirnband und Visierhalter
- b** Haltenasen für Visier
- c** Gegenklemmung für Visier
- d** Visier, Folie DIN A4
- e** Lochgummiband
- f** Bandhalterung

Herstelleranschrift:

Kunststoff-Plastik Müller GmbH
Ruiter Straße 13, 75245 Neulingen
info@kp-mueller-gmbh.de
+ 49 72 37 / 44 29 - 0



! WICHTIG! Zur Kenntnisnahme

- Das Face Shield ist kein medizinisches Produkt und kann für sich alleine keinen ausreichenden Schutz bieten.
- Sprechen Sie den Einsatz immer mit Ihrer verantwortlichen Fachkraft oder Beauftragten für Arbeitssicherheit ab.
- Wechseln Sie das Visier täglich, mindestens nach jedem Abnehmen des Face Shields.
- Der Rahmen kann und sollte mit handelsüblichem Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Der Rahmen sollte nicht länger als fünf Tage genutzt werden.
- Das Visier schützt nicht vor mechanischen oder anderen Einflüssen und kann nicht als Ersatz für Augen- und Gesichtsschutz bei Maschinen oder ähnlichem genutzt werden. Wenden Sie sich ggf. an Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit.
- Das Visier hat keine Schutzwirkung gegen Sonneneinstrahlung oder sonstige starke Lichteinflüsse.
- Achten Sie bei der Verwendung von Maschinen darauf, ob das Face Shield sich im Gefahrenbereich befindet. Wenden Sie sich ggf. an Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit.
- Das Visier kann bedingt das Sichtverhältnis verändern. Führen und bewegen Sie keine Fahrzeuge jeglicher Art mit angelegtem Face Shield.

Zusammensetzen und Anziehen

- Das mitgelieferte Visier wird mittels der 4 Löcher an den Haltenasen (b) des Rahmens (a) befestigt. Hierzu die ge-
lochte Seite mit dem äußersten rechten Loch an der äußersten rechten Haltenase einfädeln und dann nach links auf
die restlichen Haltenasen aufstecken.
- Die jeweiligen Folienenden unter die Gegenklemmung (c) schieben.
- Folie (d) auf festen Sitz prüfen.
- Das beigegefügte Lochgummiband (e) in die linke Bandhalterung (f) einfädeln.
- Das Face Shield mit der Folieninnenseite zum Gesicht aufziehen und auf angenehmen Sitz ausrichten.
- Das Lochgummiband (e) mit der passenden Lochung an der rechten Bandhalterung (f) einfädeln, um einen sicheren
und nicht verrutschenden Sitz des Face Shields zu gewährleisten.